



Erforderliches
Werkzeug



Verwenden Sie zu Ihrer
eigenen Sicherheit sichere
Werkzeuge



Verwenden Sie zu Ihrer
eigenen Sicherheit
sichere Werkzeuge



Bremsdeckel ausschlagen



Um sicher zu schneiden,
halten Sie bitte die Bremse
wie auf dem Bild



Bitte schneiden Sie beim Schneiden
von Ihnen weg



Legen Sie den Ersatzbremsbelag 10
Minuten lang in heißes Wasser (80 ° C)



Verwenden Sie keine Finger, um die
Bremsauskleidung zu entfernen



Nehmen Sie den Bremsbelag mit Werkzeugen aus dem heißen Wasser




Richten Sie den warmen Bremsbelag auf das Bremsrad aus und drücken Sie fest. Die Installation ist mit einem beheizten Bremsbelag einfacher.



Der Bremsbelag MUSS bis zum Ende des Bremsrads gedrückt werden. Situation wie auf dem Bild ist NICHT OK!



Um den Bremsbelag bis zum Ende des Bremsrads zu schieben, können Sie sich mit einem Hammer bedienen und vorsichtig durch den gesamten Bremsbelag schlagen

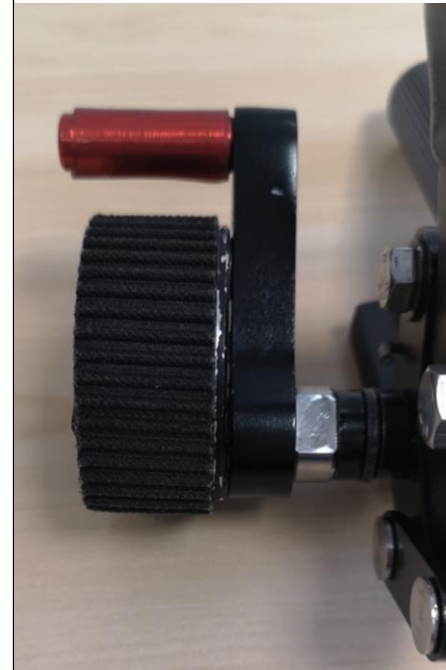

Wenn der Bremsbelag wie auf dem Bild installiert ist, ist der Installationsvorgang abgeschlossen





Nicht erforderlich, aber wir empfehlen, den Bremsbelag unten auf einem flachen Teil (1 Tropfen) auf das Bremsrad unten zu kleben.



Wir empfehlen Ihnen, die Abdeckung des Bremsrads an 3 Stellen zu kleben. (Links, rechts und oben).



Schieben Sie die Abdeckung wieder auf und Sie sind fertig!
 ☺ Bitte befolgen Sie die Installationsanweisungen für die Montage der Bremse am Rollstuhl.